



DTH GROUP

SAVE B32 SP

TÁI TẠO MÔ MỠ NỘI SINH
HƯỚNG ĐI MỚI TRONG TRẺ HOÁ DA

SAVE B32

TÁI TẠO MÔ MỠ NỘI SINH

Bước tiến mới trong *trẻ hoá da đa tầng*



DTH GROUP - ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAVE B32 TẠI VIỆT NAM

☎ 0867 016 268

LÃO HOÁ MÔ MỠ

Các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng:

Sự thay đổi của mô mỡ dưới da mới chính là yếu tố gốc rễ của lão hoá



Teo mô mỡ sâu gây mất đỡ từ bên trong



- Hõm thái dương rõ hơn,
- Lõm dưới mắt sâu hơn,
- Má hóp, gò má xẹp.

Chảy xệ mô mỡ nông - rơi tự do theo trọng lực



- Nếp mũi-má sâu hơn,
- Má trễ xuống,
- Đường viền hàm dưới mờ nhạt

Furnas DW (1989) The retaining ligaments of the cheek. Plast Reconstr Surg 83: 11- 16.




Stuzin JM, Baker TJ, Gordon HL (1992) The relationship of the superficial and deep facial fascias: relevance to rhytidectomy and aging. Plast Reconstr Surg 89: 441-449.

Byrd HS, Andochick SE (1996) The deep temporal lift: a multiplanar, lateral brow, temporal, and upper face lift. Plast Reconstr Surg 97: 928-937.

Moss CJ, Mendelson BC, Taylor GI (2000) Surgical anatomy of the ligamentous attachments in the temple and periorbital regions. Plast Reconstr Surg 105: 1475-1490

Donath AS, Glasgold RA, Glasgold MJ (2007) Volume loss versus gravity: new concepts in facial aging. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 15: 238-243

LÃO HOÁ DÂY CHẰNG

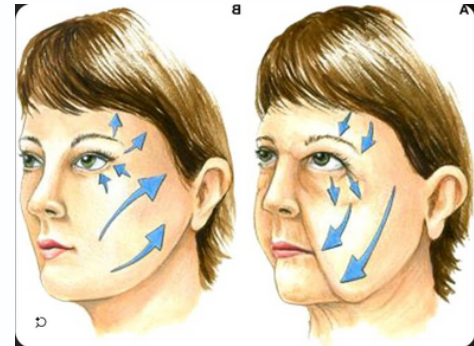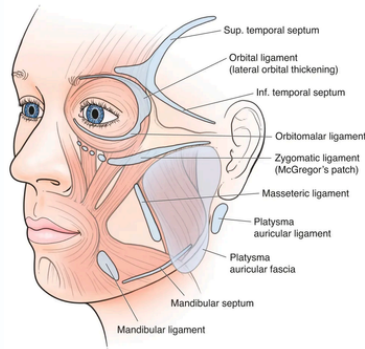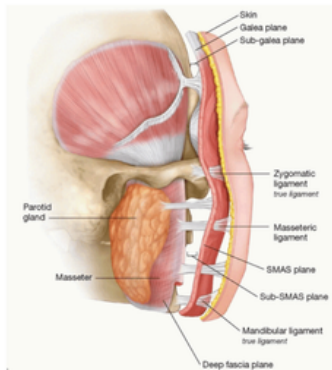

Hệ thống dây chằng – phần có vai trò giữ mô mềm đúng vị trí giải phẫu ban đầu.

Các dây chằng mặt – vốn là những dải mô liên kết neo giữ mô mềm – ban đầu được duy trì săn chắc nhờ áp lực nội mô mỡ. Nhưng theo thời gian: Khi mô mỡ bị mất → Áp lực nội mô giảm làm cho Dây chằng giãn ra, không còn giữ được mô mềm đúng chỗ khiến Mô bị trượt dần xuống

Kết quả là: => Gương mặt chảy xệ tổng thể.

MỐI LIÊN KẾT GIỮA LÃO HOÁ MÔ MỠ VÀ DÂY CHẰNG

CHUỖI DOMINO SINH HỌC



Teo mô mỡ sâu → Mất căng dây chằng → Mỡ nông chảy xệ → Da mất nền đỡ → Khuôn mặt biến dạng theo tuổi tác.

PHỤC HỒI NỀN MÔ VÀ MÔ MỠ

Chiến lược trẻ hóa hiện đại là phục hồi nền mô và mô mỡ, được xem là bước đi bắt buộc nếu muốn lấy lại vẻ đẹp tự nhiên và bền vững.



Tiêu chí	SAVE B32 SP
Thành phần	40mg HA trọng lượng phân tử cao + 40mg HA trọng lượng phân tử thấp + 40mg Succinic Acid + Copper Tripeptide-1
Độ sâu tác động	Trung bì/ Lớp mỡ nông & sâu
Hiệu quả	• Phục hồi mô mỡ bị teo do lão hóa • Cải thiện độ dày và đàn hồi mô mềm • Cấp ẩm – tăng độ trắng sáng và căng bóng – làm mờ rãnh nhăn
Liệu trình điều trị	Liệu trình tấn công: 2 buổi, mỗi buổi cách nhau 1 tháng Liệu trình duy trì: 3 - 6 tháng/buổi

CƠ CHẾ KẾT HỢP ĐẶC BIỆT 3 HOẠT CHẤT

HA phân tử kép + Succinic Acid + Copper Tripeptide-1


→ TÁI SINH MÔ MỠ

THÀNH PHẦN	TÁC ĐỘNG SINH HỌC	ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔ MỠ
HA (Hyaluronic Acid) phân tử kép	- Cấp nước sâu - Làm nền cho mô mềm - Cải thiện vi tuần hoàn	• Tạo môi trường sống lý tưởng cho tế bào gốc mỡ (ASCs) • Trẻ hoá mô mỡ • Nâng đỡ, làm đầy vùng hóp
Succinic Acid	- Kích hoạt ty thể - Tăng tổng hợp collagen - Chống viêm	• Tái hoạt hoá tế bào mỡ bị lão hóa • Chống teo mô mỡ do stress oxy hóa
Peptides (Copper Tripeptide-1)	- Kích hoạt nguyên bào sợi - Tăng biểu hiện gen ECM - Hồi phục mô tổn thương	• Tăng sinh tế bào gốc mỡ mới • Làm đầy mô mỡ theo cơ chế nội sinh

SO SÁNH GIỮA PROFILO STRUCTURA VÀ SAVE B32SP

	Profilo Structura	Save B32 SP
Thành phần	90mg HA trọng lượng phân tử cao và trọng lượng phân tử thấp	• 80mg HA trọng lượng phân tử cao và trọng lượng phân tử thấp • Succinic Acid • Đồng Peptide
Công nghệ	by Heating with Autoclave (80°C - 160°C)	Acid base equilibrium
Mục tiêu điều trị	Trẻ hoá mô mỡ, nâng đỡ, làm đầy vùng hóp	• Trẻ hoá mô mỡ, nâng đỡ, làm đầy vùng hóp • Chống teo mô mỡ do stress oxy hóa • Phục hồi vùng da bị tổn thương hoặc suy giảm nền mô
Quy cách đóng gói	2ml	2,5 ml
Vùng điều trị phù hợp	Má hóp, thái dương, hõm mắt, xương hàm, vùng mắt cấu trúc	• Má hóp, thái dương, hõm mắt, xương hàm, vùng mắt cấu trúc • Toàn mặt, cổ, tay
Số buổi điều trị	2 buổi (cách nhau 1 tháng)	2 buổi (cách nhau 1 tháng)

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT HA PHÂN TỬ KÉP

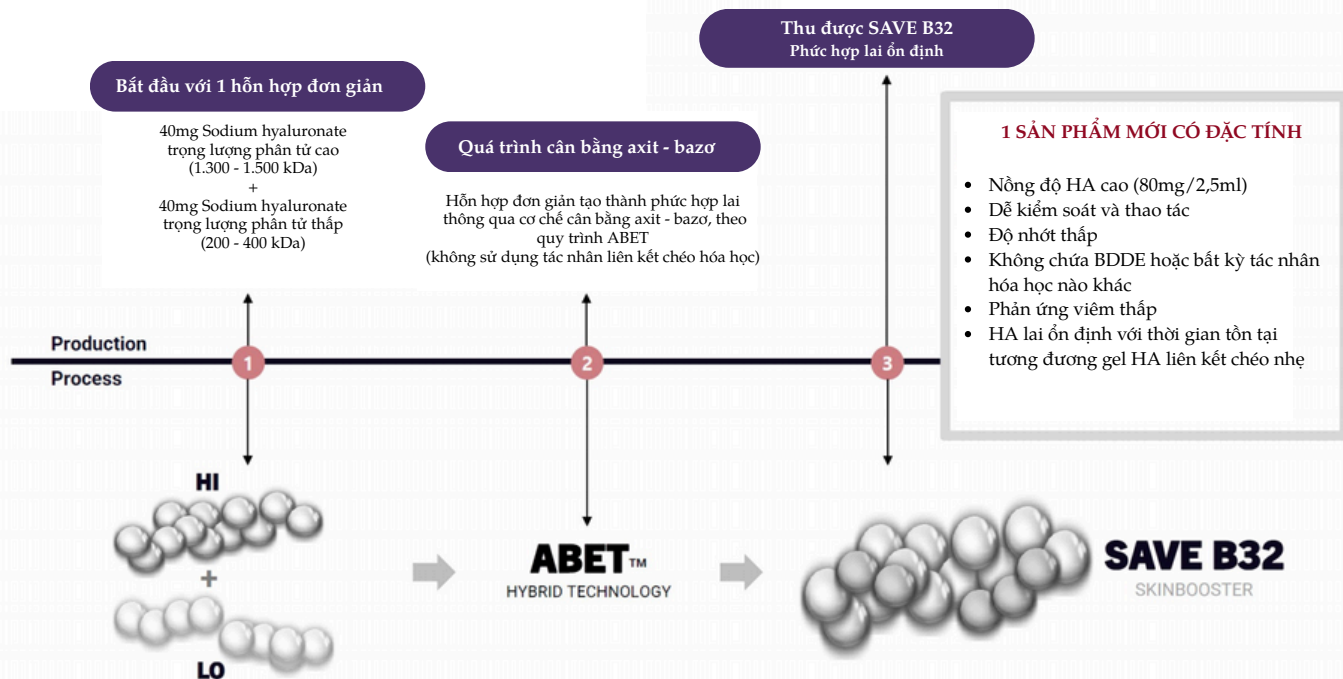

- Không sử dụng BDDE hay nhiệt độ cao → An toàn hơn, không biến tính HA, không gây phản ứng viêm.
- Tạo phức hợp HA lai ổn định → Cấp ẩm mạnh + tái tạo mô sâu + duy trì hiệu quả lâu.
- Kích thích tăng sinh mô mỡ sinh học → Phục hồi thể tích da bị mất do lão hóa
- Độ nhớt thấp – dễ tiêm – phù hợp cả kim & cannula → Giảm đau, thao tác mượt mà.
- Duy trì hiệu quả tương đương filler nhẹ (~6 tháng) mà vẫn đảm bảo tính tăng sinh cao.
- Không chịu tác động bởi nhiệt độ của môi trường → Dễ dàng bảo quản

CHỈ ĐỊNH

◆ 1. Trẻ hóa da và mô mềm vùng mặt:

- Da lão hoá nhẹ đến trung bình
- Da mỏng, kém đàn hồi, khô, xỉn màu
- Vùng da có sẹo teo, hõm má, rãnh lệ, hõm thái dương

◆ 2. Hỗ trợ điều trị vùng tổn thương hoặc suy giảm nền mô:

- Vùng da tổn thương do viêm, laser, peel nặng
- Da yếu do lão hoá nền, tiền mãn kinh
- Trường hợp da teo mô mỡ sau tiêu mỡ, RF/HIFU mạnh

◆ 3. Cải thiện độ sáng – đều màu da – cấp ẩm sâu:

- Da sần, sạm, không đều màu
- Tăng sắc tố nhẹ sau viêm (PIH)
- Bệnh nhân cần da "glow", săn, căng bóng


◆ 4. Trẻ hóa cổ – tay – vùng da mỏng

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú
- Người đang có nhiễm trùng cấp tại vùng điều trị
- Bệnh nhân có rối loạn đông máu nghiêm trọng
- Dị ứng với bất kỳ thành phần nào (HA, peptides, succinic acid – rất hiếm)

LIỆU TRÌNH

- **Giai đoạn tấn công:** 2 buổi. Mỗi buổi cách nhau 3 - 4 tuần
- **Giai đoạn duy trì:** Mỗi buổi cách nhau từ 3 - 6 tháng (Tuỳ nhu cầu khách hàng)

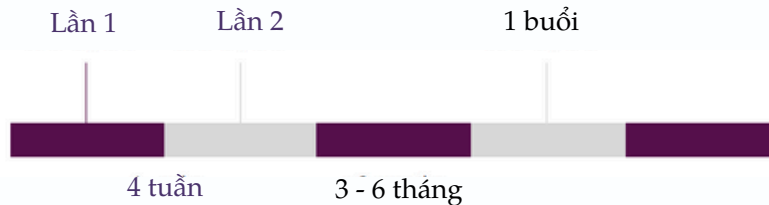

Method

Inject 0.2cc per point




After the 2nd session,
apply additional 1-2 treatment
at 3 - 6 month interval
for the maximum results



PHÁC ĐỒ TIÊM CANNULA

(Ứng dụng cho làm đầy và trẻ hoá mô mỡ)

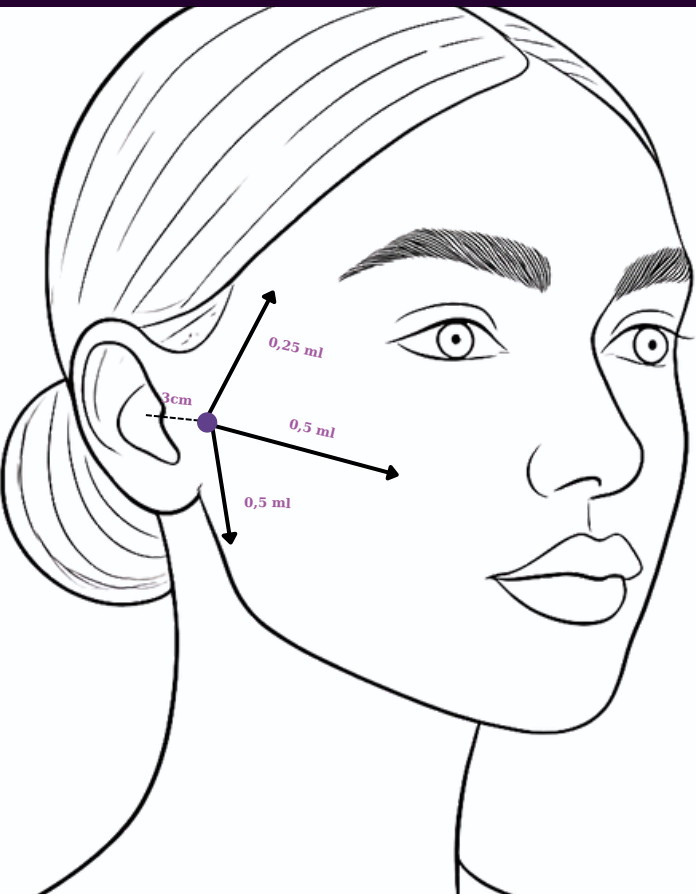

1. Vị trí tiêm

- **Vùng chỉ định:** Trước tai và vùng gò má hai bên mặt
- **Lớp mô mục tiêu:** Khoảng mỡ nông

2. Dụng cụ khuyến nghị

- Cannula: Cỡ 23G, dài 38 - 50 mm

3. Kỹ thuật tiêm

- **Kỹ thuật:** Tiêm tuyến tính
- **Hướng dẫn:** Đưa cannula vào khoang mỡ nông, quan sát chiều dài kim và điểm kết thúc. Kéo kim ra chậm rãi và bơm sản phẩm đều tay. Tránh tạo áp lực mạnh

4. Điểm chọc kim

- Khoảng cách: Cách điểm tragus (gờ tai) khoảng 3 cm

5. Liều lượng tiêm mỗi bên mặt:


- 0,5 ml tại vùng trước tai
- 0,5 ml tại vùng gò má
- 0,25 tại vùng thái dương
-

→ Tổng cộng: 1,25 ml mỗi bên mặt

Có thể ứng dụng kiến thức giải phẫu vùng mặt cho phép xây dựng phác đồ tiêm cá nhân hóa, phù hợp với đặc điểm cấu trúc mô và hình thái khuôn mặt của từng khách hàng mà không phụ thuộc phác đồ.

PHÁC ĐỒ TIÊM 6 ĐIỂM

(Ứng dụng cho toàn mặt)

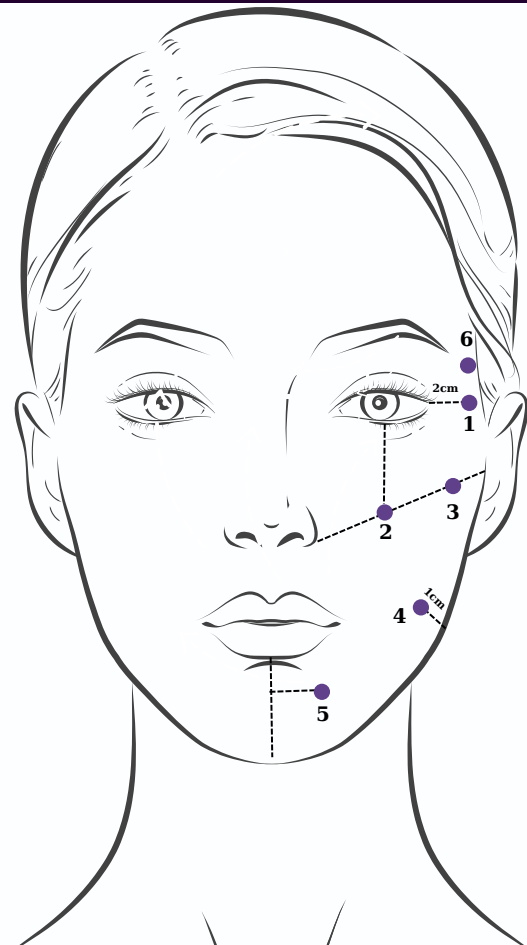

1. Vị trí tiêm

- Vùng chỉ định: Vùng mặt dưới
- Lớp mô mục tiêu: Lớp trung bì sâu

2. Dụng cụ khuyến nghị

- Kim nhọn: Cỡ 30G

3. Kỹ thuật tiêm

- Kỹ thuật: Tiêm điểm

4. Điểm chọn kim

- **Điểm 1:** Từ khoé mắt ngoài cách 2cm
- **Điểm 2:** Kéo 1 đường nối từ gờ bình tai đến cánh mũi, 1 đường vuông góc từ giữa đồng tử mắt xuống dưới. Lấy điểm giao nhau của 2 đường này là điểm tiêm số 2
- **Điểm 3:** Cách gờ bình tai 2cm
- **Điểm 4:** Xác định xương góc hàm, cách điểm xương góc hàm này vào trong 1cm
- **Điểm 5:** Vẽ 1 đường xuống góc chia đôi cằm theo chiều dọc, lấy $\frac{1}{3}$ trên của đường này, kéo ra 2cm là điểm tiêm số 5
- **Điểm 6:** Điểm thái dương (Tránh các mạch máu và dây thần kinh nguy hiểm)

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG



(A) Trước điều trị


(B) Sau 4 tuần

(C) Sau 12 tuần

(D) Sau 24 tuần

=> Có hiệu quả bền vững nếu kết hợp liệu trình định kỳ
(đặc biệt thấy rõ sau 2 - 4 tuần)

Bệnh nhân nữ 61 tuổi tiêm Save B32 bên phải.

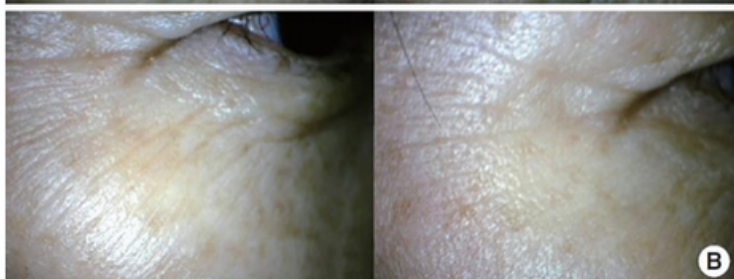

Sử dụng Save B32 pha loãng với Nacl 9% tỷ lệ 1:1 thông qua kỹ thuật tiêm nội bì bằng Mesogun

A) Trước điều trị

B) 13 ngày sau điều trị

- Vết chân chim và rãnh lệ được cải thiện đáng kể
- Nếp gấp mũi má (nasolabial fold) cũng được cải thiện chỉ sau 1 buổi điều trị duy nhất



A) Trước điều trị

Làn da của bệnh nhân khô ráp, xuất hiện nhiều nếp nhăn, đặc biệt là vùng đuôi mắt (vết chân chim), rãnh mũi má và các nếp nhăn dọc ở môi trên.



B) Sau điều trị

Làn da trở nên khỏe mạnh, săn chắc hơn, đồng thời xuất hiện hiệu ứng làm sáng da nhờ liệu trình trẻ hóa da.



Trước liệu trình



Sau liệu trình



Ngày 18/4



Ngày 13/5



Trước liệu trình



Sau liệu trình

ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI SAVE B32 ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM



DTH GROUP

VP Hà Nội: Số 1 Châu Văn Liêm, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: Số 2 Nguyễn Hữu Cánh, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

Hotline: 0886.65.2345

Website: trangtrangdecember.com

